

## ASINS PARAUGU ŅEMŠANAS KĀRTĪBA LIELLOPIEM IZCELSMES PĀRBAUDEI

Instrukcija paredzēta lietošanai  
ganāmpulku īpašniekiem un veterinārajam personālam

1. Par asins grupām sauc ar iedzimtību saistītas vielas organismā, kas tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē. Asins grupas nemainās dzīves laikā un tās pilnībā ir izveidojušās liellopiem sākot no trīs mēnešu vecuma.
2. Par asins paraugu pareizu ņemšanu, uzglabāšanu, nogādāšanu un nodošanu laboratorijā atbild pārbaudes pasūtītājs.
3. Asins paraugu ņemšanai lieto stobriņus (vakutainerus), kuros ir antikoagulants EDTA (K2) K2E vai K2E. Parasti stobriņi ir marķēti ar violetas krāsas korķi. Stobriņiem ir jābūt ar uzsūkšanās tilpumu vismaz 3 mililitri.
4. Asins paraugus ņem apmācīts personāls (veterinārais speciālists), kurš arī nodrošina parauga pareizu ņemšanu un atbilstību dotajam dzīvniekam.
5. Pēc parauga paņemšanas stobriņa saturs jāsamaisa – vienmērīgi stobriņu svārstot.  
**Izcelsmes kontrolei nav derīgi paraugi, kuri ir sarecējuši vai ņemti stobriņos ar citu antikoagulantu! Nelietot stobriņus ar HEPARĪNU!**
6. Uz stobriņa uzlīmes uzraksta dzīvnieka identifikācijas numuru.
7. Līdz nodošanai laboratorijā, asins paraugi jāuzglabā ledusskapī ( $5 \pm 2^\circ \text{C}$ ), nedrīkst sasaldēt!
8. Asins paraugiem noformē „Pavadrakstu”, kas ir lapas otrā pusē. Pavadrakstā jābūt aizpildītai visai prasītai informācijai.
9. Asins stobriņus kopā ar aizpildītu pavadrakstu iesniedz laboratorijā vēlākais trīs dienu laikā pēc paraugu ņemšanas, ja iespējams vēlams īsākā laikā.

### **PAPILDUS INFORMĀCIJA**

1. Laboratorijā paraugus pieņem **otrdienās** darba laikā. Citās darba dienās var nodot paraugus iepriekš saskaņojot (pa telefonu 67973272) vai arī sūtīt ar **kurjera** pastu (izvērtējat vai paraugi nesasals, nepārkarsīs vai netiks mehāniski bojāti).
2. Pie paraugu nodošanas ir jāsamaksā grāmatvedībā par paraugu testēšanu vai arī izraksta rēķinu un samaksu veic ar pārskaitījumu atbilstoši izrakstītam rēķinam. Ja paraugi ir saņemti pa pastu, izraksta rēķinu un to nosūtīs jums apmaksai - ar pārskaitījumu.
3. Atbildes par izcelsmes pārbaudi saņemsiet pēc 2 nedēļām no paraugu saņemšanas laboratorijā. Pēc rēķina apmaksas testēšanas pārskatu izsūtīsim vēstulē pa pastu uz jūsu norādīto adresi pavadrakstā.